

8. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE. Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

9. USKLADNENIE. Uložte na chladnom, suchom mieste pri teplote 0–40°C. Neskladujte tam, kde môžu teploty prekračovať 40°C ako na priamom slnku, v aute, v železných budovách v lete.

10. NEROZOBERAJTE. Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom alebo požiaru. Záruka je neplatná, pokiaľ bol nabíjací stojan rozobraný alebo z nej boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj alebo nabíjací stojan poškodený, kontaktujte spoločnosť Rehasport Trade s.r.o.

11. SERVIS. Pokiaľ nabíjací stojan alebo prístroj nepracujú správne, pokiaľ došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechaniu vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Rehasport Trade s.r.o. zaslaním e-mailu na info@rehasport.cz ohľadne opravy alebo servisu. Prístroj sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

12. NEPOUŽÍVAJTE POČAS KÚPANIA ALEBO SPRCHOVANIA.

Neumiestňujte ani neskladujte nabíjací stojan kde by mohol spadnúť alebo skĺznuť do vane alebo umývadla. Nevkladajte a nenechajte spadnúť do vody alebo inej tekutiny. Nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zo zdroja energie.

13. PRI NABÍJANIE PRÍSTROJ NEPOUŽÍVAJTE.

14. NESKÚŠAJTE NABÍJAŤ INÉ PRÍSTROJE než tie, ktoré sú určené pre tento nabíjací stojan.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA

Nabíjací stojan Theragun má obmedzenú záruku na 1 rok. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, za ktoré sa považujú aj opravy prevedené inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti Theragun, ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použitie, nevhodné použitie, bežné opotrebovanie, nedostatočnú údržbu alebo nehodu. Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na: info@rehasport.cz.

THERAGUN

Nabíjací stojan prístroja Theragun Elite

NÁVOD NA POUŽITIE



Výrobca: Theragun, LLC, USA

Nabíjací stojan pre prístroj Theragun Elite

Kód produktu: ELITE-STND-PKG-EU

Balenie:

Nabíjací stojan pre prístroj Theragun Elite

ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE.

Pre viac informácií o produktoch značky Theragunu navštívte: www.rehasport.sk/znacka/theragun-2.

Pre viac informácií o praktickom využití si stiahnite [Therabody App](#) na App Store alebo Google Play

Pokiaľ pre Vás tieto informácie nie sú dostačujúce, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac, môžete navštíviť vzdelávací kurz "[Terapeutické využitie Theragunu](#)". Termíny kurzov sledujte na: www.rehasport.sk/vzdelavanie.



Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Bezdrôtový nabíjací stojan pre jednoduché nabíjanie perkusívneho prístroja Theragun Elite. Bezdrôtové nabíjanie umožňuje rýchlu manipuláciu s prístrojom, ktorý môže zostať v stojane aj keď je plne nabitý. Theragun Elite nie je súčasťou balenia.

Špecifikácia

Rozmery: 10,5 cm x 20,1 cm x 12,3 cm

Doba nabíjania: 110 minút

Váha: 0,75 kg

Kompatibilita: Iba Theragun Elite

POUŽITIE

Nabíjanie Theragun Elite:

1. Pripojte napájací adaptér do portu bezdrôtového nabíjacieho stojana.
2. Vypnite prístroj.
3. Umiestnite prístroj do kolísky stojanu pre bezdrôtové nabíjanie a zatlačte dopredu, kým nebude úplne nadoraz.
4. Po správnom pripojení sa rozsvieti LED indikátor nabíjacieho stojana.
5. Prístroj je plne nabitý, keď je ikona batérie na OLED displeji zariadenia plná.
6. Theragun Elite môže zostať v bezdrôtovom nabíjacom stojane, aj keď je zariadenie plne nabité.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRED PRVÝM POUŽITÍM ALEBO NABITÍM SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE, VŠETKY NÁVODY A BEZPEČNOSTNÉ POKYNY V TOMTO MANUÁLI.

Snažíme sa, aby boli produkty čo najbezpečnejšie. Jedná sa však o moderné mechanické zariadenia s elektrickými súčiastkami. Ak nie je nabíjací stojan alebo jeho časti používané podľa návodu, hrozí nebezpečenstvo poranenia, elektrického výboja až riziko požiaru. Pri používaní je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenie, a to:

1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU. Používajte nabíjací stojan iba tak, ako je napísané v tomto prevádzkovom manuály. Používajte len s odporúčaným doporučeným príslušenstvom. Neprevádzajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuály alebo stanovené spoločnosťou Therabody.

2. NEVHODNÉ PRE DETI. Nabíjací stojan ani príslušenstvo nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaistí bezpečné nabíjanie a používanie. Nedovoľte, aby bol nabíjací stojan používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ používate v prítomnosti detí. Deti by mali byť pod dohľadom zodpovednej osoby.

3. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LEN NABÍJAČKOU URČENOU PRE TENTO NABÍJACÍ STOJAN.

Používajte len s AC adaptérom Theragun EA1045SAR. Iné typy môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nepripájajte do napájacej zástrčky alebo zapalovača cigariet.

4. NABÍJANIA. Nabíjací stojan by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte nabíjací stojan alebo prístroj na mokrom povrchu a nevystavujte vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte v prítomnosti výbušného prostredia,

5. UKONČENIE NABÍJANIA. Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjací stojan zo zástrčky, nikdy nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Neroztahujte kábel a nevystavujte tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjacím stojanom, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom pokiaľ máte vlhké ruky.

6. NABÍJACÍ STOJAN VYTIAHNITE zo zástrčky, pokiaľ ho dlhšiu dobu nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

7. NIKDY NEZAPALUJTE prístroj alebo nabíjací stojan. Pri spálení vznikajú toxické výpary a látky.