

12. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE. Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.

13. CHEMIKÁLIE Z BATÉRIE SPÔSOBUJÚ VÁŽNE POPÁLENINY. Vyvarujte sa kontaktu s pokožkou, očami alebo ústami. Pokiaľ z poškodenej batérie vytekajú chemikálie, použite k manipulácii s ňou gumové alebo neoprénové rukavice. Pokiaľ je pokožka vystavená tekutinám z batérie, umyte ju mydlom, vodou a opláchnite octom. Pokiaľ sú batériovým chemikáliám vystavené oči, okamžite ich vypláchnite vodou počas doby 20 minút a vyhľadajte lekársku pomoc. Kontaminovaný odev odstráňte a zlikvidujte ho.

14. NEPRACUJTE S PRÍSTROJOM pod prikrývkou alebo vankúšov. Môže spôsobiť elektrický výboj, poranenie alebo požiar.

15. USKLADNENIE. Uložte na chladnom, suchom mieste pri teplote 0-40°C. Neskladujte prístroj alebo nabíjačku tam, kde môžu teploty prekročiť 40°C – na priamom slnku, v aute, v železných budovách v lete.

16. LIKVIDÁCIA PRÍSTROJE S BATÉRIOU. Li-ion batérie sú šetrnejšie k životnému prostrediu ako iné typy batérií. Vždy likvidujte podľa platných predpisov a reguláciou Ministerstva životného prostredia a na miestach na to určených. Dokonca aj vybité batérie obsahujú určitú energiu. Pred likvidáciou použite elektrickú pásku k zakrytie konektorov, aby nedošlo ku skratu, čo by mohlo spôsobiť požiar alebo výbuch.

17. NEROZOBERAJTE. Demontáž alebo nesprávne opätovné zostavenie môže viesť k nebezpečeniu úrazu elektrickým prúdom, požiaru alebo vystaveniu chemikáliám v batériách. Záruka je neplatná, pokiaľ bol prístroj rozobraný, rovnako ako jeho nabíjačka alebo z nej boli odstránené niektoré súčasti. Pokiaľ je prístroj poškodený, rovnako ako jeho súčasti, kontaktujte spoločnosť Theragun alebo Rehasport Trade s.r.o.

18. SERVIS. Pokiaľ prístroj Theragun Prime alebo nabíjačka nepracujú správne, pokiaľ došlo k ostrému nárazu alebo k pádu, poškodeniu, ponechaniu vonku alebo pádu do vody, prístroj a príslušenstvo nepoužívajte a kontaktujte spoločnosť Rehasport Trade s.r.o. zaslaním e-mailu na info@rehasport.cz ohľadne opravy alebo servisu. Prístroj sa nepokúšajte opraviť alebo demontovať, pretože môže spôsobiť úraz elektrickým prúdom alebo požiar.

19. NEPOUŽÍVAJTE POČAS KÚPANIA ALEBO SPRCHOVANIA. Neumiestňujte ani neskladujte prístroj, kde by mohol spadnúť alebo sklznúť do vane alebo umývadla. Nevkladajte a nenechajte spadnúť do vody alebo inej tekutiny. Nesiahajte po prístroji, ktorý spadol do vody. Okamžite odpojte zo zdroja energie.

20. TEPELNÝ OBMEDZOVAČ. Theragun Prime používa automatický resetovací obmedzovač teploty, ktorý vypne zariadenie, aby sa zabránilo prehriatiu a požiaru.

21. POLARIZOVANÁ ZÁSTRČKA. Je možné zapojiť iba jedným smerom – znižuje riziko vzniku elektrického výboja.

22. NEPOUŽÍVAJTE V PRÍTOMNOSTI používania aerosólových sprejov alebo na miestach so zvýšenou koncentráciou kyslíka.

OBMEDZENÁ ZÁRUKA:

Theragun Prime má obmedzenú záruku na dva roky. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie, za ktoré sa považujú aj opravy prevedené inou osobou než oprávneným pracovníkom spoločnosti Theragun, ďalej sa záruka nevzťahuje na nesprávne použitie, zmeny, nevhodné použitie, bežné opotrebovanie, nedostatočnú údržbu alebo nehodu. Podrobné informácie o záruke nájdete na www.theragun.com/warranty. V prípade akýchkoľvek záležitostí týkajúcich sa záruky kontaktujte, prosím, e-mailom na info@theragun.com či info@rehasport.cz.

THERAGUN

Prime

NÁVOD NA POUŽITIE



Výrobca: Theragun, LLC, USA

Rázová terapia, masážny prístroj

Kód produktu: PRIME- PKG-EU

Balenie:

Theragun Prime, cestovný vak, nabíjačka, 4 nástavce

ULOŽTE VŠETKY POKYNY PRE NESKORŠIE NAHLIADNUTIE.

Pre viac informácií o Theragune navštívte: www.rehasport.sk/znacka/theragun-2.

Pre viac informácií o praktickom využití si stiahnite **Therabody App** na App Store alebo Google Play alebo pozrite video návody na: <https://www.rehasport.sk/videonavody>.

Ak pre vás tieto informácie nie sú dostačujúce, alebo by ste sa chceli dozvedieť viac, môžete navštíviť vzdelávací kurz "**Terapeutické využitie Theragunu**". Termíny kurzov sledujte na: <https://www.rehasport.sk/vzdelavanie>.

Distributor: REHASPORT TRADE s.r.o.
www.rehasport.cz, tel: 800 200 900



Theragun Prime je Smart prístroj na perkusívnu terapiu. Je perfektný rovnováhou sily a štýlu. Vďaka bezkonkurenčnému výkonu sa Theragun Prime stane jedinečným partnerom pri starostlivosti o Vaše telo. Teraz ešte lepšie prispôsobiteľný než kedykoľvek predtým vďaka sprievodcovskej intuitívnej aplikácii Therabody, ktorá komunikuje s Vaším prístrojom cez Bluetooth a máte možnosť vybrať si z prednastavených procedúr. Aplikácia Therabody Vám pomôcť dáť o Vašej aktivite dáva odporúčania a je Vaším sprievodcom pri použití prístroja. 16 milimetrová amplitúda dosahuje o 60% hlbšie do svalu než obyčajný vibračný masážny prístroj. Tým stimuluje cirkuláciu krvi, generuje teplo a uvoľňuje napätie vo svaloch. Theragun Prime prináša renomovanú silu Theragunu, bezkonkurenčný výkon a zároveň je tichší než kedykoľvek predtým vďaka patentovanému motoru s technológiou QuietForce™. Životnosť batérie bola navýšená na 120 minút. Nová je aj funkcia piatich rýchlostných režimov, ktorá umožňuje voľbu 1750, 1900, 2100, 2200 a 2400 perkusií za minútu. S použitím aplikácie môžete zvoliť ľubovoľnú rýchlosť v rozmedzí od 1750 ot./min. do 2400 ot./min. Prístroj prichádza so 4 jedinečnými nastavcami, ktoré lekári vyvinuli pre špecifické potreby rôznych častí tela a spôsoby ošetrovania.

Špecifikácia

- Patentovaný bezkartáčový motor s technológiou QuietForce™
- Smart perkusívna terapia s Bluetooth pripojením
- Prednastavené procedúry so sprievodcom v aplikácii
- OLED displej
- Force meter – ukazovateľ tlakovej sily
- Patentovaná ergonomická rukoväť v tvare trojuholníka
- Upravitelné rozmedzie rýchlostí (1750 – 2400 perkusií za minútu)
- Pôsobí silou: 13,6 kg
- Amplitúda: 16 mm
- Hmotnosť: 1 kg
- Rozmery: 22,5 cm x 16 cm x 7,3 cm
- Počet batérií: 1, vstavaná s výdržou 120 minút
- Doba nabíjania: 80 minút
- Záruka: 2 roky

- Dostupný doplnkový sortiment: Prime bezdrôtový nabíjací stojan

Výhody a využitie:

- podporuje celkový rozsah pohybu bez bolesti
- podporuje lepšie držanie a vnímanie tela
- zlepšuje svalovú koordináciu a mobilitu, vďaka uvoľneniu spúšťových bodov
- uvoľňuje bolestivé a stuhnuté svaly, zbavuje telo stuhnutosti napr. pri cestovaní
- uvoľní svalové kŕče, čo pomôže svalom doplniť novú energiu a lepšie sa hydratovať
- zrýchľuje zahriatie svalov pred tréningom, po tréningu napomáha k rýchlejšej regenerácii
- nahrádza pretahovanie svalov v každodennej rutine
- regenerácia celého tela behom 15 minút
- s prístrojom dotiahnete až na 90% svojho tela, vďaka ergonomickej rukoväti v tvare trojuholníka

VAROVANIE

Behom používania prístroja Theragun Prime nedávajte prst alebo žiadne iné predmety do blízkosti kovového piestu nad masážnym nastavcom. Kovový piest môže byť pri dlhšom používaní veľmi horúci. Nepoužívajte Theragun cez ohryzok alebo krčný stavec C4. Nepoužívajte prístroj na hlave alebo v blízkosti vašich genitálií. Počas tehotenstva nepoužívajte Theragun. Dávajte pozor na zamotanie vlasov do držiaku nastavca alebo iných pohyblivých častí prístroja. Nevystavujte prístroj a nabíjačku priamemu kontaktu s vodou. Čistite ho čistiacou hubkou alebo ľahko navlhčenou handričkou. Neblokujte vetracie otvory motora. Tento produkt nie je určený pre diagnostikovanie a liečenie. Nepoužívajte žiadne iné masážne nastavce a nabíjačky než tie, ktoré sú určené pre Theragun Prime. Používajte výhradne podľa návodu. Iné príslušenstvo môže trvalo poškodiť prístroj.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY:

PRED POUŽITÍM PRÍSTROJA THERAGUN Prime ALEBO NABITÍM LITHIUM-IONTOVEJ BATÉRIE SI, PROSÍM, PREČÍTAJTE, všetky návody a bezpečnostné pokyny v tomto manuáli.

PRED PRVÝM POUŽITÍM SA MUSÍ PRÍSTROJ NABIŤ.

Snažme sa, aby bol prístroj Theragun Prime čo najbezpečnejší. Jedná sa však o moderné mechanické zariadenia s elektrickými súčiastkami. Ak nie je prístroj alebo jeho časti používané podľa návodu, hrozí nebezpečenstvo poranenia, elektrického výboja až riziko požiaru. Pri používaní prístroja Theragun Prime je vždy nutné dodržiavať základné bezpečnostné opatrenie, a to:

1. POUŽÍVAJTE LEN PODĽA NÁVODU. Používajte prístroj iba tak, ako je napísané v tomto prevádzkovom manuáli. Používajte len s doporučeným príslušenstvom a s náhradnými dielmi. Neprevádzajte žiadnu inú údržbu, ktorá nie je uvedená v tomto prevádzkovom manuáli alebo stanovené spoločnosťou Theragun.

2. NEVHODNÉ PRE DETI. Prístroj Theragun Prime ani príslušenstvo nie sú určené pre použitie malými deťmi alebo osobami so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo osobami s nedostatočnými skúsenosťami a znalosťami, pokiaľ nie je jeho používanie pod vedením a dohľadom zodpovednej osoby, ktorá zaistí bezpečné nabíjanie a používanie prístroja. Nedovoľte, aby bol prístroj používaný ako hračka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť, pokiaľ prístroj používate v prítomnosti detí, alebo keď ho deti používajú. Deti by mali byť pod dohľadom, aby ste sa uistili, že sa nebudú hrať s prístrojom a príslušenstvom.

3. NEPRIPÁJAJTE NABÍJAČKU, AK JE PRÍSTROJ V PREVÁDZKE!

4. UPOZORNENIE: ABY STE ZNÍŽILI RIZIKO ZRANENIA, NABÍJAJTE LEN NABÍJAČKOU URČENOU PRE THERAGUN Prime. Iné typy nabíjačiek môžu spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Nepripájajte do napájacej zástrčky alebo zapalovača cigariet. Batérie sa môžu trvale zničiť alebo poškodiť.

5. NABÍJANIA. Theragun by mal byť nabíjaný pod strechou v dobre vetranom a suchom prostredí. Nenabíjajte vonku, v kúpeľni alebo do vzdialenosti 3 metrov od vane alebo bazénu. Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku na mokrom povrchu a nevystavujte vlhkosti, dažďu ani snehu. Nepoužívajte prístroj ani nabíjačku v prítomnosti výbušného prostredia, pretože môže vytvoriť iskry, ktoré by mohli spôsobiť požiar.

6. UKONČENIE NABÍJANIA. Po ukončení nabíjania vyťahujte nabíjačku zo zástrčky, nikdy nie za kábel, aby ste znížili riziko poškodenia elektrickej zástrčky a kábla. Nikdy neprenášajte nabíjačku pomocou kábla. Chráňte kábel pred teplom, olejom a ostrými hranami. Nepoužívajte a nenabíjajte, keď je kábel poškodený. Neroztahujte kábel nabíjačky a nevystavujte ju tlaku. Umiestňujte kábel mimo vyhrievanej plochy. Nemanipulujte s nabíjačkou, vrátane koncovky nabíjačky alebo s prístrojom pokiaľ máte vlhké ruky.

7. NABÍJAČKU VYTIAHNITE, pokiaľ ju nepoužívate. Odpojte nabíjačku zo zástrčky, pokiaľ ju dlhšiu dobu nepoužívate. Uistite sa, že kábel nabíjačky je umiestnený tak, aby sa nepohol, nezapadol ani nebol vystavený poškodeniu alebo tlaku. Poškodenú nabíjačku okamžite vymeňte.

8. NEPREBÍJAJTE BATÉRIU. Nenechávajte prístroj v nabíjačke dlhšie než hodinu po úplnom nabití batérie. Nadmerné nabitie zariadenia môže časom znížiť životnosť batérie.

9. NEBLOKUJTE VETRACIE OTVORY MOTORA. Nevkladajte do vetracích otvorov žiadne prekážky. Prístroj nepoužívajte, keby bol blokovaný ktorýkoľvek vetrací otvor; chráňte pred prachom, bavlnenými vláknami, vlasmi alebo čímkoľvek čo môže znížiť prúdenie vzduchu. Udržujte vlasy, voľné oblečenie a prsty z dosahu vetracích otvorov a pohyblivých častí, rovnako ako nastavce.

10. NIKDY NEZAPALUJTE PRÍSTROJ. Vstavaná batéria môže explodovať a spôsobiť zranenie alebo poškodenie. Pri spálení akumulátoru vznikajú toxické výpary a látky.

11. NESTLÁČAJTE, NEHÁDŽTE ALEBO NENIČTE. Nepoužívajte prístroj alebo nabíjačku, ktorá bola vystavená prudkému úderu, spadla, bola prejdená alebo bola inak poškodená.