

THERAGUN mini

Návod k použitiu

Začíname

Krok 1

Zapnutie

Ak chcete Theragun mini zapnúť, pevne stlačte a podržte multifunkčné napájanie/ rýchlostné tlačidlo na boku zariadenia, potom použite Theragun mini cez oblasti, ktoré potrebujete ošetriť. Podľa potreby použite ľahký až mierny tlak.

Krok 2


Stiahnite si aplikáciu Therabody

Provedieme vás nastavením bez stresu a ukážeme vám, ako z toho vyťažiť maximum.

Krok 3

Cíťte ten rozdiel.™ Každý deň.

Zhlboka sa nadýchnite a doprajte si vedené liečebné predvolby alebo Freestyle režim. To všetko je navrhnuté pre vás.

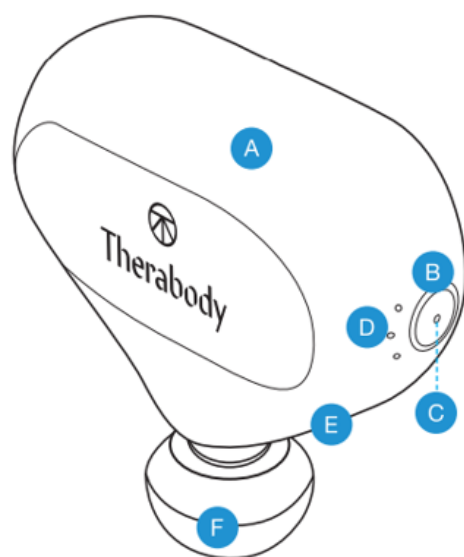


- A Ergonomická rukoväť
- B Multifunkčné napájanie/tlačítko rýchlosti
- C LED kontrolka batérie
- D LED indikátor rýchlosti
- E Nabíjací port USB-C
- F Zameniteľné

Použitie Theragun mini

1. Ak chcete zapnúť Theragun mini, pevne stlačte a podržte multifunkčné zariadenie tlačidlo napájania/rýchlosti na pravej strane zariadenia.
2. Pohybujte prístrojom po oblastiach, ktoré potrebujú ošetrovanie, a postupne na ne aplikujte mierny tlak podľa potreby.
3. Ďalším stlačením tlačidla napájania/rýchlosti môžete prepínať medzi 3 rýchlosťami.
4. Ak chcete Theragun mini vypnúť, pevne stlačte a podržte tlačidlo napájania/rýchlosti pokiaľ sa zariadenie nevypne.

Pripájanie nástavcov

1. Zarovnajzte nastavtec so špičkou a zatlačením pripojte. Pre odstránenie uchopte nastavtec, na každú stranu položte 1 prst.
2. Odstráňte nastavtec.

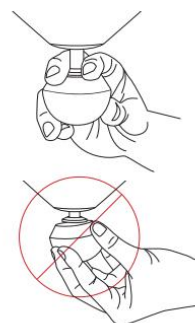





Nabíjanie Theragun mini

1. Theragun mini podporuje USB-C. Pre nabíjanie, po vypnutí zariadenia, zapojte jeden koniec káblu, ktorý je súčasťou balenia do USB zariadenia a druhý koniec do zariadenia.
2. Kontrolka LED na tlačítku napájania/rýchlosti bude blikať až do úplného nabitia.
3. Nabíjanie je dokončené, keď sa rozsvieti kontrolka LED na tlačítku napájania/rýchlosti sýto zelene.
4. Úroveň batérie sa nepretržite zobrazuje na LED kontrolke napájania/rýchlosti, keď je zariadenie zapnuté.
5. Ak chcete zobraziť úroveň nabitia batérie, keď je zariadenie vypnuté, krátko stlačte tlačidlo napájania/rýchlosti a LED kontrolka batérie bude blikať, aby indikovala úroveň batérie.

Úroveň batérie

Úroveň batérie Theragun mini je indikovaná nasledujúcimi farbami:

-  Blikajúca oranžová: Nízke nabitie
-  Blikajúca modrá: Nabité do polovičky
-  Blikajúca zelená: Vysoké nabitie
-  Svietiaci zelená: Plne nabité

Čistenie Theragun mini

Pre čo najhygienickejší zážitok zariadenia Theragun mini dezinfikujte po každom použití:

1. Utrite zariadenie dezinfekčnou handričkou, aby ste odstránili všetky zvyšky.
2. Akonáhle je zariadenie bez zvyškov, dezinfikujte povrch pomocou novej handričky utierajte všetky strany pohybom dole.

Múdre funkcie

Váš Theragun mini je inteligentné zariadenie s pripojením Bluetooth pre bezproblémové spárovanie s aplikáciou Therabody. Keď si stiahnete aplikáciu, prevedieme vás nastavením krok za krokom a ukážeme vám, ako spárovať vaše zariadenie. Po spárovaní s vaším zariadením môže aplikácia na diaľku upravovať rýchlosť a aktivovať so sprievodcom predvoľby liečby a vytvorí odporúčania v reálnom čase na základe vášho použitia.

[Naskenujte QR kód](#)



Príslušenstvo

Váš Theragun mini je dodávaný s 3 nastavcami navrhnutými pre lepšie prispôsobenie liečby.

- Vyrobené z pohodlnej PU peny s uzavretými bunkami
- Ľahko sa čistí
- Neabsorbujú pot, telové mlieka ani oleje

Cielenejšia možnosť pre celkové použitie. Štandardný nastavtec je špeciálne navrhnutý pre celkové použitie na veľké aj malé svalové skupiny.



Standard Ball

Pre citlivé oblasti a celkové použitie. Nastavtec Dampener je špeciálne navrhnutý pre všeobecné použitie a ošetrovanie s nízkym dopadom okolo citlivých oblastí.

Jeho široká základňa maximalizuje povrch pre väčší a efektívnejší kontakt s telom.



Dampener

Pre spúšťové body a spodnú časť chrbta. Špeciálne navrhnutý tak, aby napodobňoval skutočný ľudský palec.



Thumb