


Theragun mini

Prečítajte si priložené bezpečnostné inštrukcie.

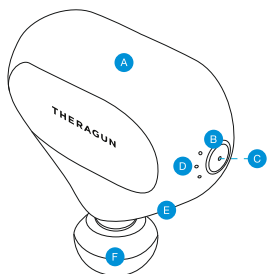

- A Ergonomická rukoväť
- B Multifunkčné tlačidlo
- C LED indikátor batérie
- D LED indikátor rýchlosti
- E Port na pripojenie nabíjačky
- F Vymeniteľný nástavec

Použitie Theragunu mini

1. Silným stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla na pravej strane zapnete prístroj Theragun mini.
2. Nechajte prístroj plávať po svaloch, ktoré si vyžadujú najvyššiu pozornosť. Podľa potreby pridávajte alebo ubierajte tlak.
3. Opätovným stlačením multifunkčného tlačidla prepínajte medzi 3 rýchlosťami ošetrovania.
4. Prístroj vypnete silným stlačením a podržaním multifunkčného tlačidla. Tlačidlo nechajte stlačené kým sa Theragun mini nevypne.

Nasadenie a zloženie nástavca

Nasmerujte nástavec tak, aby korešpondoval tvar koncovky ramena s tvarom priehlbiny v nástavci. Nasadte zatlačením, diely do seba zacvaknú.

Zloženie nástavca – uchopte spodnú časť nástavca a vytiahnite.

Váš Theragun mini prichádza s nástavcom Standard Ball, ktorý je vytvorený na univerzálne použitie.

Theragun mini je kompatibilný s PRO nástavcami 3. generácie a so všetkými nástavcami 4. generácie.

Nabíjanie Theragunu mini

1. Vypnite prístroj Theragun mini a pripojte nabíjačku.
2. LED indikátor batérie začne blikať.
3. Nabíjanie je dokončené, keď svieti neprerušovane zelený indikátor stavu batérie.
4. Zapnutý prístroj zobrazuje stav batérie pomocou LED kontrolky. Pre zobrazenie stavu batérie vypnutého prístroja stačí ľahko stlačiť tlačidlo a indikátor batérie sa rozsvieti.

Stav batérie

Stav batérie Theragunu mini sa zobrazuje takto:

-  **Blikajúca červená:** Slabá batéria
-  **Blikajúca modrá:** Polovica batérie
-  **Blikajúca zelená:** Nabité
-  **Neprerušovaná zelená:** Plne nabité